

トラストキャッチャー スワブ Type-B

特別な技術や機器もいらず、唾液の採取・ろ過・滴下をその場で簡単に行うことができるキットです。

専用の試薬容器（チューブ）との組み合わせで、検体の不活化処理も可能。

試薬容器セット



①トラストキャッチャー
スワブ Type-B

②試薬容器
(チューブ)

製品名 トラストキャッチャー スワブ Type-B

対象物 唾液

採取量 400～700 μ L

全量滴下時回収率 50～60% (※1)

滴下量 20～40 μ L / 滴 (※2)

試薬チューブ封入量 ～1000 μ L

用途 遺伝子検査装置の前処理、イムノクロマトへの滴下等

(※1) 検体の粘性によって変動いたします

(※2) 検体の粘性や溶液の組成により変動いたします




お客様指定の試薬を
弊社で分注・アルミ封止
することも可能です。



スワブは袋入りになります。
(電子線滅菌処理済み)

使用方法

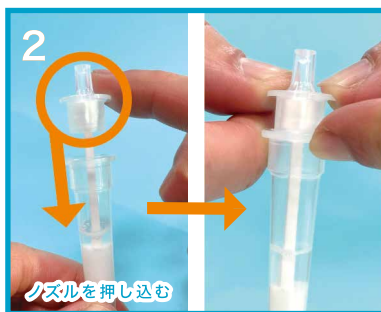

ノズルを押し込む



- 1 袋を開封し、スワブを取り出します。
スワブのスポンジ部分を口に含み、軽く噛むようにしながらスポンジが完全に柔らかくなるまで唾液を浸み込ませます。
- 2 試薬入り容器（チューブ）のアルミシールを剥がします。唾液を含んだスポンジをチューブに挿入し、ノズルをチューブとの隙間がなくなるまでしっかりと押し込みます。
- 3 容器を逆さにし、ノズルから唾液を滴下して検体を利用します。

製品名：トラストキャッチャー スワブ Type-B

商品区分：医療用捲綿子

製造販売届出番号：28B3X10016000104

材質：ノズル /PP、バー /ABS

スポンジ /PVA、袋 /PE

保管方法：直射日光を避け、常温（5～30 $^{\circ}$ C）
で保管してください。

※ ご使用の際は必ず添付文書をご参照ください。